

French

GUARDIAN ALERT 911

avec DECT 6.0™



Profitez de la liberté d'une vie indépendante!

INSTRUCTIONS

No de modèle 30911



Remarque : Vous devez installer la pile avant d'utiliser l'appareil.

Nous vous remercions d'avoir choisi le Guardian Alert 911 : votre lien personnel avec le service d'urgence 911 lorsque vous en avez besoin.

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL EN ENTIER ET LE CONSERVER POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Contenu :

Les articles ci-dessous sont inclus avec votre Guardian Alert 911 . Vous pouvez commander d'autres accessoires et des pièces de rechange de LogicMark, LLC en communiquant avec le service à la clientèle au 1-800-519-2419.



Pendentif



Base



Adaptateur c.a.



Pince à ceinture



Cordon



Fil téléphonique



Tournevis



Séparateurs de ligne



**Pile Litium Ion
type de 10440**

Accessoires en option :



**Batterie de secours
no 30912**



**Boîte de verrouillage
no 30913**

TABLE DES MATIÈRES

Aperçu du Guardian Alert 911	3
Installation de la pile	4
Emplacement de la base	4
Caractéristiques du pendentif	5
Caractéristique de la base	5
Branchement du Guardian Alert 911	
Branchement standard.....	6
Branchement d'un deuxième téléphone.....	6
Si votre maison est équipée d'une connexion VoIP / DSL.....	6
Utilisation du Guardian Alert 911	
Au sujet du pendentif	7
Y attacher la longe.....	7
Résistance à l'eau.....	7
Vérification de la pile.....	8
Vérification du système.....	8
Composition d'urgence à l'aide du bouton panique	10
Raccrocher	10
Guide de dépannage	11

Aperçu du Guardian Alert 911 :

Le Guardian Alert 911 est un minuscule téléphone haut-parleur, assez petit pour être porté au cou. Il est plus petit que la plupart des téléphones cellulaires.

En appuyant sur un seul bouton, le Guardian Alert 911 compose automatiquement le numéro d'urgence 911. Vous pourrez alors parler directement au téléphoniste du 911 au sujet de votre urgence.


Sa portée est suffisante pour couvrir la plupart des maisons et même le jardin. Il NE s'agit PAS d'un téléphone cellulaire, il ne fonctionnera donc pas loin de la maison. Il a d'abord été conçu pour être utilisé dans la maison. Vous pouvez utiliser la fonction de vérification du système (voir page 10) pour confirmer que le PENDENTIF se trouve à portée de la BASE.

Le PENDENTIF Guardian Alert 911 est équipé de sa propre pile remplaçable. Vous devez installer la pile avant d'utiliser l'appareil. Elle dure de 6 à 12 mois en mode d'attente. Étant donné que vous n'avez jamais besoin de recharger le PENDENTIF, vous pouvez toujours le garder avec vous. Nous vous recommandons de remplacer la pile du PENDENTIF tous les six mois.

Comme c'est le cas pour la plupart des téléphones sans fil, pour fonctionner, le Guardian Alert 911 doit être branché dans une prise murale à l'aide d'un adaptateur c.a. (inclus). Vous pouvez utiliser une batterie de secours, offerte en option, pour faire fonctionner la BASE du Guardian Alert pendant 24 heures en cas de panne de courant. Pour la commander, téléphonez au numéro du service à la clientèle, indiqué à l'endos de ce manuel. Demandez la pièce no 30912.

Installation de la pile :

- La pile peut être déjà installée. Appuyez sur le bouton TEST blanc au bas du pendentif pour vérifier.
- Si la pile n'est pas installée, utilisez le tournevis fourni pour dévisser les deux petites vis et retirer le couvercle de la pile.
- Insérez la pile au lithium-ion rechargeable dans le pendentif en vous assurant que le côté Négatif ou Argent est vers le haut, en direction de l'antenne.
- Remettez le couvercle en place et utilisez le tournevis pour serrer les deux vis.

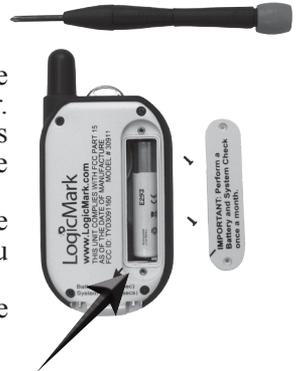

“+” Terminal

REMARQUE : *Ce n'est PAS une pile AAA jetable. Elle devrait assurer des années de fonctionnement, mais si vous devez la remplacer, veuillez communiquer avec le Service client au 1-800-519-2419.*

Pour vous assurer que le Guardian Alert 911 fonctionnera lorsque vous en aurez besoin, remplacez la pile tous les six mois.

REMARQUE : *Le couvercle de la pile ne s'installe correctement uniquement dans une direction.*

Le pendentif de charge :

Placez le pendentif dans l'unité de BASE, poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il repose fermement sur les contacts de charge. Assurez-vous que la LED de charge s'allume en rouge, indiquant que la charge. La LED de charge sera verte lorsqu'elle est complètement chargée.

LED de charge




Emplacement de la base :


Pour obtenir les meilleurs résultats et une portée optimale, placez la BASE dans un endroit éloignée des appareils ménagers qui peuvent causer des interférences électriques. Ces appareils incluent les fours à micro-ondes, les téléviseurs, les batteurs ou mélangeurs électriques, les sèche-cheveux et les autres téléphones sans fil.

Si vous utilisez plus d'un gardien alerte 911 dans la maison, il est recommandé que les BASES sont au moins 3 m (10 pi) de distance.

Caractéristiques du pendentif :

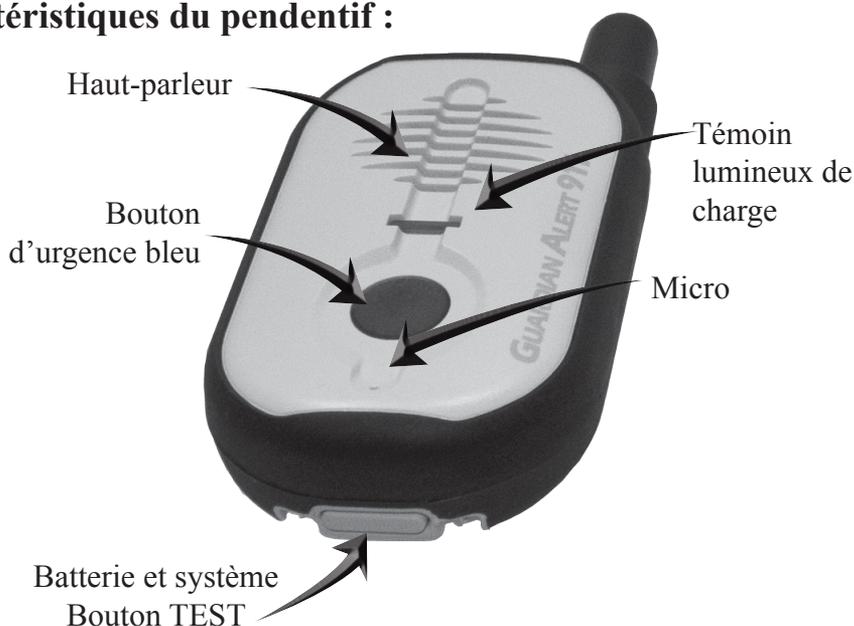

Caractéristiques de la base :

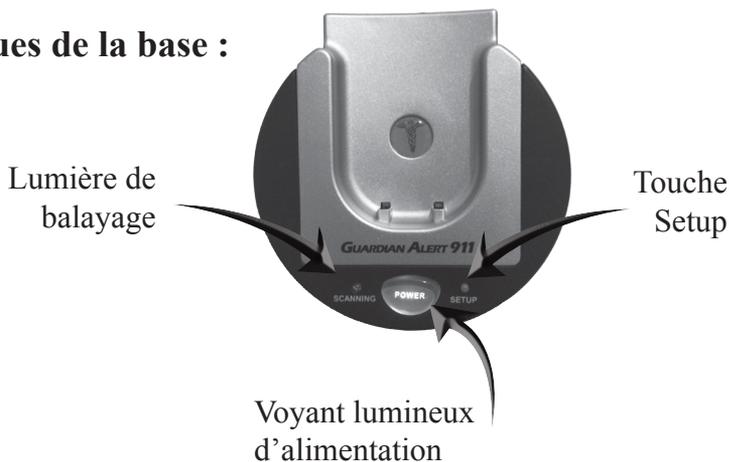

Branchement du Guardian Alert 911 :


Branchement standard :

Le Guardian Alert 911 ne nécessite ni ligne, ni service spécial. Il fonctionnera avec votre ligne Touch-Tone et votre service téléphonique de maison actuels. Il fonctionne comme tout autre téléphone sans fil.

Il suffit de brancher l'ADAPTATEUR c.a. et le FIL TÉLÉPHONIQUE de la façon illustrée.

Le Reliant le gardien alerte 911 :

La connexion Standard :

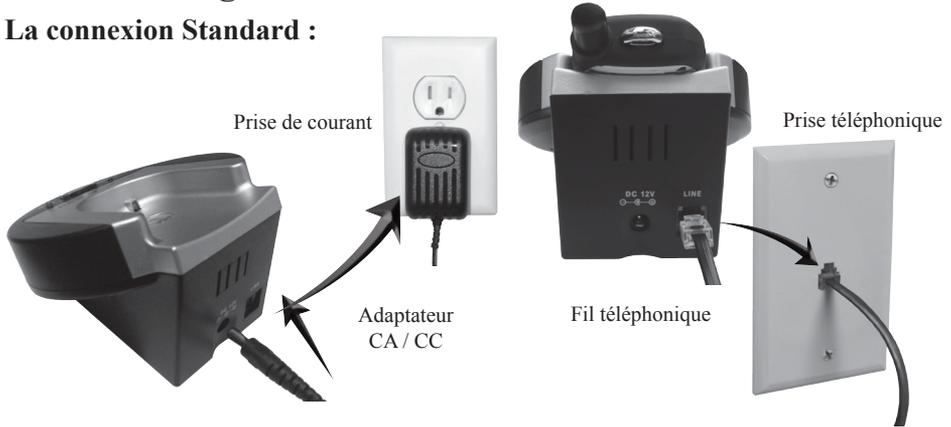


Guardian Alert 911 ne nécessite ni ligne, ni service spécial. Il fonctionnera avec votre ligne Touch-Tone et votre service téléphonique de maison actuels. Il fonctionne comme tout autre téléphone sans fil.

Il suffit de brancher l'ADAPTATEUR c.a. et le FIL TÉLÉPHONIQUE de la façon illustrée.

Mise en garde : Ne branchez pas l'ADAPTATEUR CA dans une prise contrôlée par un interrupteur. L'interrupteur pourrait être accidentellement fermé, ce qui empêcherait la BASE de fonctionner.

Branchement d'un deuxième téléphone :

Il se peut que vous deviez brancher un téléphone conventionnel dans la même prise que le Guardian Alert 911. Vous pouvez le faire facilement à l'aide d'un séparateur de lignes téléphoniques (inclus). Voir l'illustration de droite.

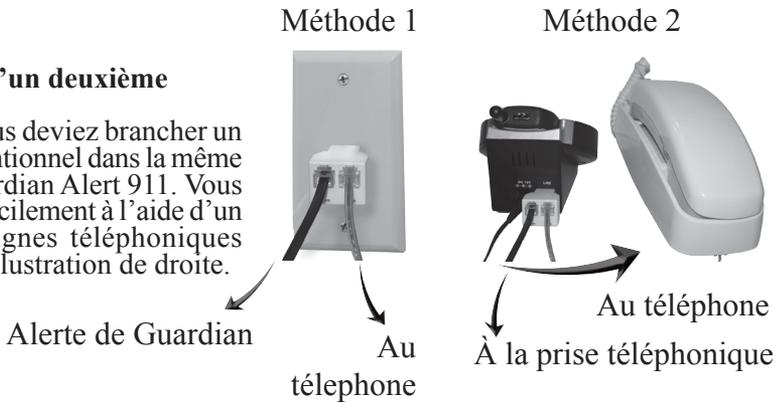

Note spéciale à l'attention de ceux dont le téléphone est de type VoIP :
Le protocole de voix sur Internet (VoIP) est un service téléphonique qui envoie votre appel sur l'Internet plutôt que sur un système téléphonique classique. Guardian Alert 911 fonctionnera sur la plupart des systèmes de voix sur IP.
Il est important (si vous ne l'avez pas déjà fait) d'enregistrer votre adresse physique auprès de votre fournisseur de voix sur IP et de vérifier que l'accès au service 911 est disponible.

Si c'est votre système de téléphonie VoIP : Guardian alerte 911 fonctionne bien sur la plupart systèmes de Voice Over IP, (VoIP), qui envoient des voix sur l'internet. Vous devez connecter la 911 alerte Guardian dans le spécial VoIP téléphone analogique modem (ou routeur) utilisez-vous pour vos téléphones résidentiels. Si vous n'êtes pas sûr à ce sujet, consultez votre fournisseur de VoIP.



Si votre maison a DSL :

Si votre maison a service DSL pour votre ordinateur, vous devrez utiliser un filtre ADSL conformément à the Guardian alerte 911 ou il ne sera pas travail. Ce filtre peut provenir d'un fournisseur d'électronique local ou votre fournisseur de services de LAN. Voir l'image de l'exemple d'un filtre ADSL à droite.

Utilisation du Guardian Alert 911 :

Au sujet du pendentif :

Le PENDENTIF est un minuscule téléphone haut-parleur. Vous pouvez le porter au cou ou à la ceinture à l'aide de la pince incluse ou le garder dans une poche.

Sur le devant du PENDENTIF se trouve un grand bouton bleu qui, lorsque vous l'enfoncez pendant plus de ½ seconde, active le système et compose automatique le 911.

Une fois la connexion établie, vous pouvez parler directement au téléphoniste du 911 et décrire votre urgence.

Y attacher la longe :

Si la courroie de cou doit être utilisé, installer, comme indiqué à droite.



Résistance à l'eau (il n'est pas étanche) :

Veillez noter que, bien que le pendentif est résistant à l'eau, il n'est pas étanche. Exposition régulière aux eau, savons, shampooings et revitalisants peut endommager les joints de l'eau au fil du temps mais aussi affecter les performances de l'enceinte – réduction du volume. Pour prolonger la vie de votre pendentif, nous vous recommandons de jeter le pendentif juste à l'extérieur de la douche ou la baignoire, mais bien à portée de main un accident survenait dans la douche ou baignoire.

Vérification de la pile :

Le Guardian Alert 911 possède un vérificateur de pile intégré. Lorsque vous appuyez sur le bouton à l'arrière du PENDENTIF, un message vocale indique l'état de la pile. Vous entendrez l'un des message suivants :

« Battery is OK »

(Batterie est OK).

Vérifier l'état de la batterie deux fois par mois.

« Recharge battery soon » (Recharger la batterie dès)

Frais pendentif dans l'unité de BASE.

« Recharge battery now » (Recharger maintenant.)

Frais pendentif dans l'unité de BASE.

Remarque : Si vous n'obtenez aucune réponse après avoir appuyé sur le bouton pendant une seconde ou plus, la pile est déchargée. Vous devez la changer immédiatement.



Vérifiez la pile deux fois par mois, en même temps que la vérification du système expliquée à la page suivante. Si vous la vérifiez tous les jours, elle se déchargera plus rapidement et ne durera pas aussi longtemps.

Vérification du système :

Le bouton sur le fond de l'affaire du pendentif est également utilisé pour effectuer la vérification du système. Maintenez ce bouton enfoncé pendant quatre secondes. Un des messages suivants seront :

« Système de vérification, toutes les fonctions sont OK.

Cela confirme ce qui suit :

- État de la batterie.
- Le pendentif travaille.
- L'unité de BASE fonctionne.
- L'unité de BASE est reliée à une ligne de téléphone de travail.
- Le pendentif est à portée de l'unité de BASE.



Bouton TEST

« BASE et pendentif hors de portée. »

Cela confirme une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Le pendentif est défectueux.
- L'unité de BASE est défectueuse.
- Le pendentif et l'unité de BASE ne communiquent pas entre eux ou sont hors de portée.
- Ne peut pas détecter téléphone ligne/tonalité. »
- L'unité de BASE n'est pas connectée à la ligne téléphonique ou ne peut pas obtenir la tonalité pour une raison quelconque.

Si vous recevez un de ces notifications, reportez-vous au guide de dépannage au dos de ce manuel pour déterminer la cause.

Cette fonctionnalité est très utile - ce qui vous permet de confirmer que le système a une couverture de tous les coins de votre maison. Tout simplement à pied aux différentes parties de votre maison et appuyez sur le bouton TEST jusqu'à ce que vous entendez la tonalité et l'invite vocale « SYSTEM CHECK, toutes les fonctions sont OK ».

Nous vous recommandons d'effectuer les contrôles toutes les deux semaines pour confirmer que votre système fonctionne correctement, que le pendentif et la station de base sont dans une bonne communication, et que la station de base peut obtenir la tonalité. Il est également recommandé d'effectuer cette vérification système après un orage éclair qui pourrait endommager la station de base qui est branchée sur la ligne téléphonique.

Composition d'urgence à l'aide du bouton panique :

Dans le cas d'une urgence, appuyez sur le bouton panique bleu à l'avant du PENDENTIF. Lorsque vous appuyez sur ce bouton pendant plus de 1 seconde, le Guardian Alert 911 compose automatiquement le 911. Lorsque le téléphoniste du service d'urgence répond, parlez d'une voix normale et il vous entendra. Il n'est pas nécessaire de tenir le PENDENTIF près de votre bouche. On vous entendra clairement, même si le PENDENTIF est à un bras de distance.



Bouton d'urgence bleu

Raccrocher :

Vous pouvez accrocher vers le haut de n'importe quel moment en appuyant sur le bouton de TEST sur le fond de l'affaire du pendentif. Si l'opérateur 911 raccroche le téléphone, et vous ne pas raccrocher avec ce bouton de test, le système encore éteindra automatiquement après 3 minutes de silence.

Plage de fonctionnement :

La plage de fonctionnement de votre 911 alerte Guardian dépendra de nombreux facteurs, dont les murs intermédiaires, les interférences électriques ou les divers appareils tels que les aspirateurs, fours à micro-ondes, mélangeurs, moulins à café, sèche-cheveux et autres sources d'interférences électriques autour de la maison. Le système doit couvrir votre maison typique (environ 5 000 pi²) et une courte distance en avant, latérales et arrière yards. Exécuter le système contrôle à la page 10 pour déterminer les limites de votre système pour connaître les limites de fonctionnement dans votre maison et les environs.



Bouton TEST

GUIDE DE DÉPANNAGE

Que faire si le Guardian Alert 911 ne fonctionne pas?

Étape 1 – Vérifiez le PENDENTIF.

Que faire :

Appuyez sur le BOUTON VÉRIFICATION DE LA PILE/
VÉRIFICATION DU SYSTÈME au bas du PENDENTIF.

Que se passera-t-il :

Un message vocal indique l'état de la pile.

Un voyant à l'avant du PENDENTIF s'allume.

S'il ne se passe rien, une pile déchargée ou mal installée constituent les principales causes.

Si le PENDENTIF semble fonctionner, passez à l'étape 2.

Étape 2 – Vérifiez les branchements de la BASE.

Que faire :

Assurez-vous que l'ADAPTATEUR c.a. est branché dans une prise murale c.a. qui fonctionne et dans la BASE.

Que se passera-t-il :

Le voyant bleu de MISE EN MARCHÉ est allumé si la BASE est branchée.

Si le voyant de MISE EN MARCHÉ est allumé et que la BASE est branchée à une ligne téléphonique en fonction, passez à l'étape 3.

Étape 3 – Assurez-vous que le PENDENTIF et la BASE communiquent entre eux.

Renseignements généraux : Le PENDENTIF et la BASE sont liés par des ondes radio. Ils doivent être synchronisés pour fonctionner ensemble. Ils devraient avoir été synchronisés à l'usine, mais il est facile de le faire.

Que faire :

1. Appuyez sur le bouton « SETUP » sur la BASE jusqu'à ce que le voyant « SCANNING » rouge s'allume. Relâchez le bouton « SETUP ».
2. Maintenant, appuyez sur le BOUTON PANIQUE et le BOUTON DE TEST en même temps et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le voyant de la BASE s'éteigne.

Que se passera-t-il :

Le voyant rouge de la BASE s'éteint. Cela indique que le PENDENTIF et la BASE sont synchronisés. À ce moment, tout devrait bien fonctionner.

Si votre Guardian Alert 911 ne fonctionne toujours pas, communiquez avec notre service de SOUTIEN TECHNIQUE au 1-800-519-2419.

Portée :

La portée de votre Guardian Alert 911 dépendra de nombreux facteurs y compris les murs, l'interférence électrique ou différents appareils comme les aspirateurs, les fours à micro-ondes, les mélangeurs, les moulins à café, les sèche-cheveux et autres sources de parasites d'origine électrique dans la maison. Le système a une portée suffisante pour couvrir une maison de taille normale, ainsi que l'avant, le côté et l'arrière. Effectuez une vérification du système, comme il est décrit à la page 10, pour connaître les limites du système chez vous.

Mises en gardes générales et précautions

Mise en garde!

- LogicMark, LLC NE prétend PAS que cet appareil est entièrement étanche. Pour réduire les risques d'endommager l'appareil, N'exposez PAS le pendentif ou la base à l'eau, à la pluie ou à l'humidité.
- Le Guardian Alert 911 est conçu pour un usage résidentiel seulement. Il peut mal fonctionner s'il est branché à certaines systèmes téléphoniques commerciaux.
- Le Guardian Alert 911 ne fonctionne qu'avec les systèmes Touch-Tone. Ne l'utilisez pas si vous avez un système à impulsions.
- Ce produit et ces accessoires peuvent contenir du plomb, un produit chimique reconnu par l'état de la Californie comme pouvant causer des malformations congénitales et autres problèmes de reproduction.

Instructions de sécurité importantes :

Lorsque vous utilisez votre Guardian Alert, veuillez respecter les instructions suivantes afin de réduire les risques de blessure, d'électrocution ou d'incendie.

1. Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.
2. Lisez attentivement toutes les instructions et assurez-vous de bien les comprendre.
3. Débranchez cet appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de liquide pour nettoyer la base et le pendentif. Utilisez uniquement un linge humide.
4. Ne placez pas la base près d'une source d'eau, comme dans une salle de bain, près d'un évier de cuisine ou dans tout autre endroit semblable.
5. N'ouvrez pas l'appareil (sauf le compartiment à pile, selon les instructions) ou le pendentif pour quelque raison que ce soit. Toute tentative d'ouvrir la base ou le pendentif annule la garantie et peut endommager l'appareil ou nuire à son bon fonctionnement.
6. N'utilisez aucune autre source d'alimentation que celle fournie par LogicMark, LLC spécifiquement pour cet appareil. L'utilisation de toute autre source d'alimentation peut endommager cet appareil ou rendre son utilisation non sécuritaire.
7. Si l'appareil est endommagé, ne tentez pas de le réparer. Veuillez le retourner à LogicMark, LLC afin qu'il soit réparé ou remplacé selon la « GARANTIE LIMITÉE D'UN AN ».

Garantie limitée et clause de non-responsabilité LogicMark

AVERTISSEMENT::

LogicMark, LLC. n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du Guardian Alert 911 et n'est pas responsable du mauvais fonctionnement dû aux autres appareils branchés à la même ligne téléphonique. Nous ne sommes pas responsables de la qualité de la ligne téléphonique, ni de la fiabilité ou de la qualité du service téléphonique avec lequel le Guardian Alert 911 est utilisé. LogicMark, LLC. n'est pas responsable de l'installation du 911 Guardian Phone. Elle n'est pas responsable de la mauvaise utilisation ou de l'utilisation abusive de cet appareil.

LIMITATIONS S'APPLIQUANT À LA COMMUNICATION ET AUX RÉPONSES :

L'acheteur s'engage à reconnaître que les signaux qui sont transmis sur les lignes téléphoniques, ou d'autres moyens de communication parcourent les réseaux de communication échappant totalement au contrôle de LogicMark LLC et ne sont pas maintenus par LogicMark LLC qui ne sera par conséquent pas tenu responsable de tout problème de communication ou de tout dysfonctionnement du matériel empêchant les signaux de transmission de parvenir aux opérateurs du numéro d'urgence de la police ou des dommages qui en résultent. L'acheteur reconnaît que LogicMark LLC ne fournit aucune réponse à son équipement Guardian Alert 911. L'équipement a été conçu pour communiquer avec les opérateurs du numéro d'urgence de la police et LogicMark LLC n'est pas et ne pourra être tenu responsable du temps de réponse des services de police ou d'autres services d'urgence ou de la réponse fournie par le centre d'assistance du numéro d'urgence de la police.

LE SERVICE TÉLÉPHONIQUE ET ÉLECTRIQUE EST NÉCESSAIRE ET LA

RESPONSABILITÉ DE L'ACHETEUR : L'acheteur reconnaît que l'équipement Guardian Alert 911 (y compris la batterie de secours en option) se branche dans une prise téléphonique standard et communique sur des lignes de téléphone standard utilisant la communication téléphonique bidirectionnelle. Vous devez utiliser un adaptateur spécial (non fourni) pour utiliser l'équipement avec la transmission par voix sur IP. La voix sur IP ne fonctionnera pas si votre réseau électrique est interrompu à moins de disposer d'une batterie de secours pour votre ordinateur et votre système Guardian Alert 911. L'acheteur reconnaît que l'équipement Guardian Alert 911 (et la batterie de secours en option) fonctionne sur du courant et se branche sur des prises électriques de type 110 Vca, des prises téléphoniques, un bloc multiprises RJ11 ou équivalent, dont l'acquisition et l'entretien incombent à l'acheteur.

TEST ET ENTRETIEN DE l'équipement Guardian Alert 911 : L'équipement Guardian Alert 911 (et la batterie de secours en option), une fois installés, appartient exclusivement à l'acheteur qu'en a le contrôle, et il lui incombe de tester le fonctionnement de l'équipement et de demander un entretien de garantie si l'équipement est sous garantie.

GARANTIES LIMITÉES. LogicMark LLC ne garantit pas que le système Guardian Alert 911 évitera toute perte, tout dommage ou blessure aux personnes ou au matériel, ou que le système d'alerte d'urgence fournira dans tous les cas la protection pour laquelle il est installé ou conçu. L'acheteur reconnaît que LogicMark LLC n'est pas un assureur, et que l'acheteur assume tous les risques de perte ou de blessure aux personnes ou au matériel. LogicMark LLC ne confère aucune garantie, à l'exception de celles exprimées dans le présent document et décline toute responsabilité quant à la garantie de commerciabilité ou d'adéquat à une fin particulière.

RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR : Le recours exclusif de l'acheteur en cas de manquement de la part de LogicMark LLC consiste à exiger de LogicMark LLC une réparation ou un remplacement à la seule discrétion de LogicMark LLC, de l'équipement ou d'une partie du système d'alerte d'urgence qui connaît une défaillance pendant la période de garantie de LogicMark LLC.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : L'équipement Guardian Alert 911 n'est pas conçu ou garanti contre toute perte ou toute blessure. Cette Garantie Limitée ou Clause de non-responsabilité constitue les conditions de vente et d'utilisation de l'équipement Guardian Alert 911 (et accessoire) et si nonobstant les conditions de vente et d'utilisation du produit, aucune responsabilité devrait incomber à LogicMark LLC résultant de toute cause, indépendamment du fait que cette perte, dommage ou blessure personnelle a été provoquée ou favorisée par la négligence de LogicMark LLC quant au manquement à une obligation ou responsabilité stricte, ladite responsabilité sera limitée à une somme versée par l'acheteur à LogicMark LLC pour le produit, ou la somme de 150 dollars, quelle que soit la plus élevée.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

LogicMark, LLC garantit au premier acheteur que ce produit est exempt de défauts de fabrication ou de main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation normales pour une période d' **un** (1) an à partir de la date d'achat originale. Lorsque le premier acheteur retourne ce produit, port payé, à LogicMark, LLC; 8625 Hampton Way; Fairfax Station, Virginia 22039, USA au cours de la période de garantie et si le produit est défectueux, LogicMark, LLC pourra, à sa discrétion, le réparer ou le remplacer.

Cette garantie constitue la seule responsabilité de LogicMark, LLC concernant ce produit. LogicMark, LLC décline expressément toute autre garantie, **INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDÉ ET DE CONVENANCE POUR UN BUT PRÉCIS. AUCUNE PERSONNE, FIRME OU SOCIÉTÉ N'EST AUTORISÉE À ASSUMER POUR** LogicMark, LLC. **TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ EN LIEN AVEC LA VENTE ET L'UTILISATION DE CE PRODUIT.** LogicMark, LLC et ses agents et distributeurs ne seront pas responsables de tout dommage accessoire ou indirect ou de frais de tout genre.

Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, la clause ci-dessus concernant les dommages accessoires ou indirects peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie est nulle si le produit a été endommagé ou altéré ou si toute partie du produit a été ouverte. Pour tout dommage subit dans le transport, une réclamation doit être présentée à l'entreprise de transport et non à LogicMark, LLC.

Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits légaux variant selon l'état.

Renseignements de la FCC :

No d'identité de la FCC : TYD30911

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer de l'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris, l'interférence pouvant entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

La confidentialité des communications ne peut pas être assurée avec ce téléphone

LogicMark

The Leader in Two-Way Voice Communication

10106 Bluegrass Parkway;
Louisville, Kentucky 40299

Tél. : 703-934-7934

Toll Free: 1-800-519-2419

Télé. : 703-934-7935

www.LogicMark.com

©2017, LogicMark, LLC

Part # 5011F